

AlproJet-W

Prodotto: Concentrato (acido) pulente per la pulizia di sistemi di aspirazione dentale

Descrizione: AlproJet-W è una soluzione priva di aldeidi e fenoli per la manutenzione e la pulizia settimanale dei sistemi di aspirazione dotati o meno di separatore di amalgama.

Composizione: Acido amidosolfurico, tensioattivi.

Funzioni: AlproJet-W è un preparato speciale di uso settimanale per rimuovere, dissolvere e sciacquare via ogni residuo di sangue.

Confezione: AlproJet-W al 5% è disponibile in bottiglia da 1 lt. e ricambio da 5 lt.

AlproJet-W è parte integrante del sistema AlproJet ed è da utilizzarsi in combinazione con AlproJet-DD.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Facile da usare	Miscelare 50 ml di AlproJet-W con 950 ml di acqua calda (40°C). Risciacquare con acqua solo prima di iniziare a lavorare.
Formula plurifunzionale	AlproJet-W dissolve il gesso (acido), neutralizza il perossido di idrogeno (H ₂ O ₂) e il bicarbonato di sodio.
Altamente compatibile, non produce schiuma	AlproJet-W neutralizza il perossido di idrogeno (H ₂ O ₂): previene così la formazione di schiuma ed è compatibile con qualsiasi tipo di materiale.
Pulisce e deodora	AlproJet-W deodora mentre pulisce eliminando i batteri che causano cattivo odore e lascia un fresco profumo in tutto il sistema.
Riduce i rischi di contaminazione trasversale	AlproJet-W pulisce e disinfetta il sistema di aspirazione e quindi riduce il rischio di contaminazione trasversale. Le tubazioni del sistema di aspirazione sono un campo fertile per i batteri. Questo ambiente scuro, caldo e umido contribuisce alla crescita di batteri e funghi che causano malattie.
Riconoscimenti	AlproJet-W è stato testato e approvato da Sirona.
Protezione e tranquillità	Un uso regolare di AlproJet-W in combinazione con AlproJet-DD elimina la presenza di tessuto, sangue, amalgama, gel al fluoro e detriti dentali che possono ostruire il sistema causando pressione sulla pompa di aspirazione e guasti conseguenti.
Amico dell'ambiente	Le sostanze attive contenute in AlproJet-W sono biodegradabili in conformità alle direttive dell'OECD.

CE 0123

 **DENTALICA**

via Rimini 22 – 20142 Milano – tel. 02-895.981 – fax. 02-8950.4249 – e-mail dentalica@dentalica.com – <http://www.dentalica.com>