

# TIMELESS ACTIVATION



MANIPOLO AD ULTRASUONI  
PER L'ATTIVAZIONE  
DELLA SOLUZIONE IRRIGANTE

**PRECISION** TECH

**ENDO CLEANER**

**Endo Cleaner** è un manipolo appositamente sviluppato per l'attivazione ad ultrasuoni delle soluzioni irriganti. La sua frequenza di vibrazione favorisce la cavitazione e il flusso acustico dei liquidi che rendono più efficace la detersione del canale radicolare.



**Attivazione ultrasonica**

Gli ultrasuoni ad alta frequenza (45 KHz) permettono un'efficace pulizia del canale e favoriscono la penetrazione dell'irrigante anche in strutture anatomiche complesse e difficili da strumentare.



**Comfort estremo**

Il manipolo cordless leggero (solo 95 gr) e compatto, garantisce un'autonomia operativa di circa 4,5 ore. Semplice ed intuitivo da utilizzare, non richiede alcun settaggio iniziale.

**2 livelli di potenza**

Endo Cleaner dispone di due livelli di potenza prestabiliti, facili da impostare e indicati da una luce LED sul display.



**3 inserti disponibili**

Inserti flessibili, lisci e non lavoranti con potenza precalibrata per lavorare in totale sicurezza. Gli inserti sono inoltre autoclavabili e riutilizzabili.



**X-Blue:** flessibile e precurvabile



**X-Gold:** potente



**X-Silver:** morbida e flessibile

Misura	Lunghezza (mm)
#20 2%	18 & 21
#25 2%	18 & 21



1. Sagomare il canale radicolare e riempirlo con la soluzione irrigante. Inserire la punta di Endo Cleaner nel canale tenendola a 2-3 mm dall'apice e irrigare per 30 secondi.



2. Ripetere l'attivazione per 3-4 cicli.



3. Asciugare il canale e completare l'otturazione.



# ENDO CLEANER

Manipolo ad ultrasuoni  
per l'attivazione della soluzione irrigante

*"Circa il 35% delle pareti canalari non vengono strumentate a causa della loro complessità anatomica, indipendentemente dalla tecnica di sagomatura utilizzata."*

*(Peters et al. 1,2001)*

La sagomatura canalare produce detriti e fango dentinale che si depositano sulle pareti del canale, ostruendo i tubuli e limitando la detersione.

L'attivazione degli irriganti attraverso sistemi ad ultrasuoni migliora significativamente la pulizia del canale, e quindi il risultato del trattamento endodontico.

## *I Plus della tecnologia ad ultrasuoni:*

- *Distrugge il biofilm*
- *Favorisce l'apertura dei tubuli dentinali*
- *Semplifica e riduce i tempi di irrigazione*
- *Migliora l'otturazione finale*



# ENDO CLEANER

Manipolo ad ultrasuoni  
per l'attivazione della soluzione irrigante



## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	22x18x7 cm
Peso	95 gr
Frequenza	45/60 Hz +-

## ENDO CLEANER KIT COMPLETO - Codice: PR00ENDOCK

- Manipolo
- Alimentatore
- 3 punte (Gold, Silver, Blu)
- Chiave per punte
- Guaina isolante
- Base manipolo

Creato in esclusiva per

 **DENTALICA**  
Into quality

PRECISION TECH è un marchio di:  
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano  
info@dentalica.com - www.dentalica.com

Numero Verde  
**800 70 71 72**